



Q.Light[®] SKIN CARE UNIT

Made in Switzerland 

Q.Light terapia światłem w pielęgnacji skóry

Q.Light SKIN CARE UNIT jest systemem przeznaczonym do terapii kosmetycznych, w celu odmłodzenia, wygładzenia i nadania skórze młodego wyglądu.

W miarę upływu czasu zauważamy wyraźne ślady szkodliwego wpływu promieniowania UV na skórę. Czas, złe odżywianie, zły styl życia przyspieszają proces starzenia skóry. Każdy z nas chciałby jak najdłużej zachować młody i zdrowy wygląd.

Q.Light SKIN CARE UNIT jest przeznaczony do stosowania w leczeniu i pielęgnacji skóry w gabinetach dermatologicznych, klinikach medycyny estetycznej, salonach piękności a także do terapii domowych.

Główne wskazania to:

- pielęgnacja skóry
- działanie odmładzające (przeciw efektom starzenia)
- leczenie trądziku
- leczenie cellulitu
- łagodzenie bólu.


Q.Light® SKIN CARE UNIT



Moduły SKIN CARE:




Dane techniczne Q.Light SKIN CARE UNIT

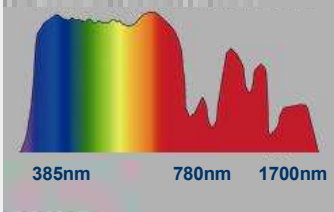Urządzenie	Q.Light® 70 NT IR - SKIN CARE UNIT
Moduły	SKIN CARE, ANTI-AGEING, ACNE CARE, CELLULITE CARE, PAIN CARE i 6 modułów do koloroterapii
Średnica naświetlanej powierzchni w cm	25cm z max. odległości leczniczej
Źródło światła	Opatentowane źródło naturalnego widma światła dziennego (kryptonowe źródło światła)
Spektrum	385 – 1700nm 
Polaryzacja	≥ 98%
Emisja widzialnego światła	Widzialne światło pomiędzy 385 – 780nm
Emisja podczerwieni	Bliska podczerwień pomiędzy 780 -1700nm
Emisja UV	bez UV
Temperatura światła	Optymalny rozkład energii w całym widmie. Praktycznie zimne światło.
Certyfikaty	ISO 9001 & EN 46001
Znak CE	1275

Jakość światła Q.Light SKIN CARE UNIT

Q.Light SKIN CARE UNIT emituje spektrum światła z opatentowanego technologicznie źródła światła.

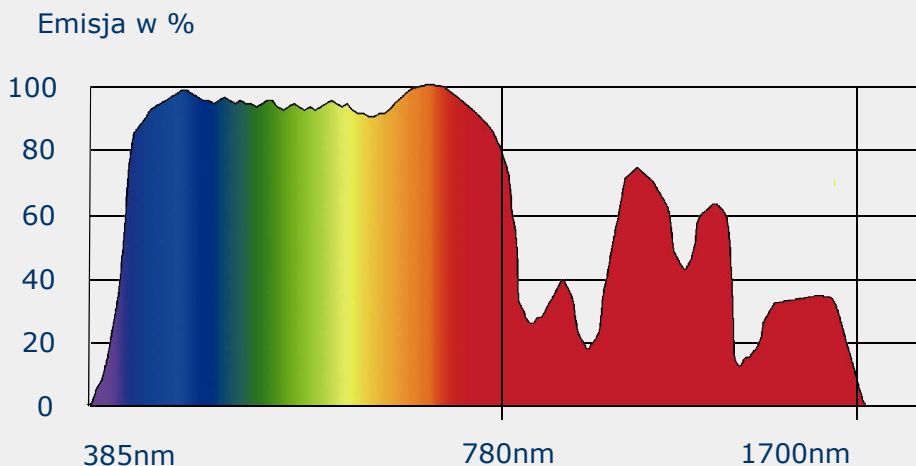

Q.Light parametry lecznicze dla Q.Light SKIN CARE UNIT

Urządzenie	Stopień polaryzacji	Odległość lecznicza	Średnica naświetlania
Q.Light® SKIN CARE UNIT	≥98%	25cm (max.)	25cm (max.)
		20cm	20cm
		15cm	15cm

Dodatkowe dane techniczne Q.Light SKIN CARE UNIT


Urządzenie	Q.Light® SKIN CARE UNIT
Napięcie	230 V, 50 - 60 Hz / 110 V, 60Hz
Pobór mocy	50 VA max.
Klasa bezpieczeństwa	II, Typ B
Standardowa gęstość mocy	40 mW/cm ² , 2,4 J/cm ² (min.) z max. odległości leczniczej
Waga	1'120g
Wymiary	260 x 158 x 173 mm
Gwarancja	24 miesiące od daty dostarczenia




Q.Light SKIN CARE UNIT Zestaw specjalistycznych modułów

Q.Light SKIN CARE UNIT oferuje specjalistyczne moduły do terapii, które pozwalają na leczenie specyficznych schorzeń skóry zawsze odpowiednim i najlepszym spektrum leczniczego światła. Wkładając odpowiedni moduł do aparatu **Q.Light SKIN CARE UNIT** uzyskujemy specjalistyczny leczniczy system do terapii. Uzyskane w ten sposób spektrum światła pozwala na osiągnięcie najlepszych efektów leczniczych w różnych rodzajach terapii kosmetycznych.


Q.Light® SKIN CARE Module / 385 - 780nm (pielęgnacja skóry)

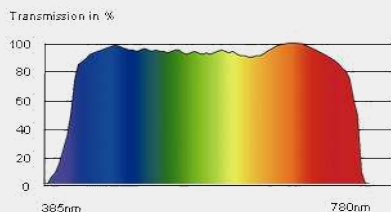


Q.Light® ANTI-AGEING CARE Module / 385 -1700nm (przeciw objawom starzenia)

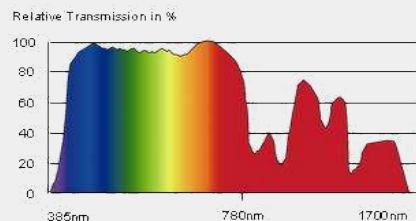


Q.Light® ACNE CARE Module / 385 - 500nm (leczenie trądziku)

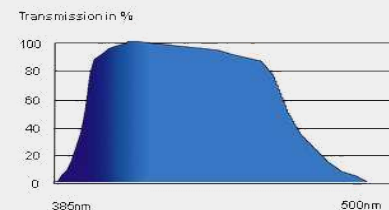

Q.Light® CELLULITE CARE Module / 550 - 1700nm (leczenie cellulitu)

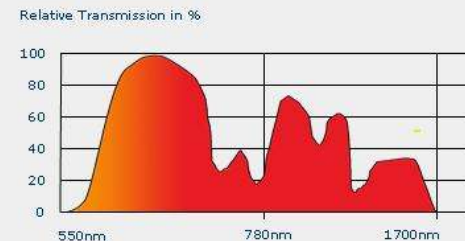

Q.Light® PAIN CARE Module / 580 -1700nm (leczenie bólu)

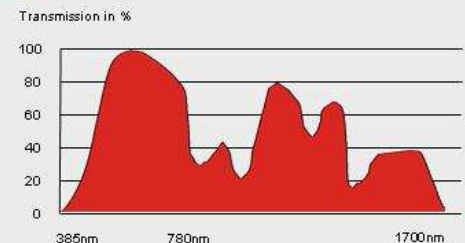

Moduł Q.Light SKIN CARE (pielęgnacja skóry) przeznaczony jest do terapii , wspierania i pielęgnacji skóry zwalczając negatywne skutki działania środowiska i niezdrowego stylu życia.

Moduł **Q.Light SKIN CARE** jest przeznaczony specjalnie do pielęgnacji skóry w przypadku:


- suchej i napiętej skóry
- codziennej pielęgnacji
- działanie wygładzające
- ochrona przed pojawianiem się różnych zmian skórnych
- skóry podrażnionej

oraz


- pobudza procesy regeneracji skóry
- optymalizuje transport tlenu do komórek skóry
- stymulacja ROS w komórkach skóry (specyficzny reaktywny tlen)

oraz przed aplikacją kremów dermatologicznych, kosmetycznych i serum.

Q.Light® SKIN CARE Module

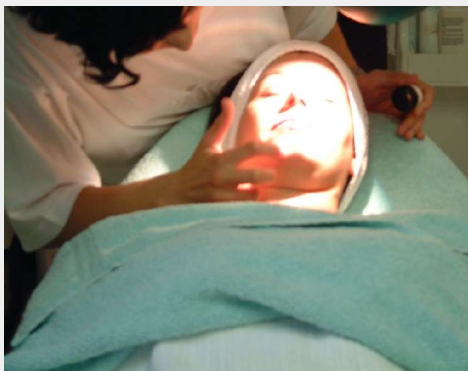


Dane techniczne modułu Q.light SKIN CARE

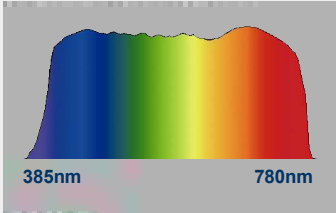Urządzenie	Q.Light® SKIN CARE MODULE
Średnica naświetlanej powierzchni w cm	25cm z max. odległości leczniczej
Źródło światła	Opatentowane źródło naturalnego widma światła dziennego (kryptonowe źródło światła)
Spektrum	385 – 780nm 
Polaryzacja	≥ 98%
Emisja widzialnego światła	Widzialne światło pomiędzy 385 – 780nm
Emisja podczerwieni	Bez podczerwieni
Emisja UV	Bez UV
Temperatura światła	Optymalny rozkład energii w całym widmie. Praktycznie zimne światło.
Certyfikaty	ISO 9001 & EN 46001
Znak CE	1275

Jakość światła emitowanego przez Q.Light SKIN CARE Moduł

Emisja światła Q.Light z modułem SKIN CARE

Emisja w %

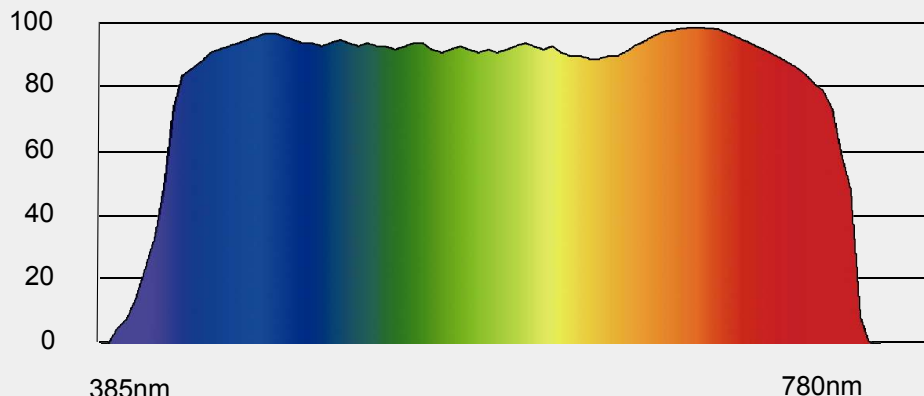

Q.Light parametry lecznicze i dawki lecznicze w min. dla Q.Light SKIN CARE UNIT z modułem SKIN CARE

Urządzenie	Stopień polaryzacji	Odległość lecznicza	Średnica naświetlania	Dawka lecznicza w min
Q.Light® 70 NT IR SKIN CARE UNIT	≥98%	25cm	25cm	6
		20cm	20cm	5
		15cm	15cm	4

Jak prowadzić terapię urządzeniem Q.Light SKIN CARE Moduł

Ogólna pielęgnacja skóry

Terapia **Q.Light SKIN CARE** wzmacnia skórę i jej funkcje biologiczne. Pojedyncze sesje zabiegowe są krótkie i mogą być łatwo łączone z innymi standardowymi zabiegami kosmetycznymi. W zależności od wskazań zabiegi **Q.Light SKIN CARE** są przeprowadzane przez kilka minut w połączeniu z innymi zastosowanymi zabiegami.



Aby stosować efektywną terapię światłem **Q.Light** – zaleca się oczyścić skórę przed ekspozycją na światło. Średnia dawka dostarczonej energii powinna wynosić 12J/cm², strumień spolaryzowanego światła powinien być skierowany pod kątem prostym do naświetlanej powierzchni, czas naświetlania 6 minut (na każdą naświetlaną powierzchnię) z odległości 25cm. Przed lub po zabiegu mogą być stosowane specjalistyczne dermatologiczne lub kosmetyczne kremy lub serum. Jednakże bezpośrednio przed naświetlaniem **Q.Light** resztki kremów powinny być usunięte z powierzchni skóry.

Kondycja skóry widocznie poprawia się w przeciągu pierwszych dwóch tygodni terapii.

Działania niepożądane oraz przeciwwskazania nie zostały odnotowane.

Moduł Q.Light ANTI-AGEING dla młodszej, gładziej i zdrowszej wyglądającej skóry.


Moduł **Q.Light ANTI-AGEING** przeznaczony jest specjalnie dla:

- redukcji zmarszczek i poprawy konturu twarzy
- opóźnienia efektów starzenia
- poprawy krążenia krwi w naczyniach włosowatych skóry
- stymulacji i regulacji mechanizmów naprawczych skóry
- do codziennej pielęgnacji starzejącej się skóry
- matowej i zmęczonej skóry
- skóry zwiotczalej
- przed aplikacją kremów opóźniających procesy starzenia oraz serum zaczerwienionej skóry z pajączkami naczyniowymi

Q.Light® ANTI-AGEING moduł (przeciwko procesom starzenia)




Dane techniczne modułu Q.Light ANTI-AGEING CARE

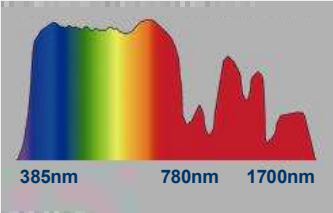Moduł	ANTI-AGEING CARE
Średnica naświetlanej powierzchni w cm	25cm z max. odległości leczniczej
Źródło światła	Opatentowane źródło naturalnego widma światła dziennego.
Spektrum	385 – 1700nm 
Polaryzacja	≥ 98%
Emisja widzialnego światła	Widzialne światło pomiędzy 385 – 780nm
Emisja podczerwieni	Bliska podczerwień pomiędzy 780 -1700nm
Emisja UV	Bez UV
Temperatura światła	Optymalny rozkład energii w całym widmie.
Certyfikaty	ISO 9001 & EN 46001
Znak CE	1275

Jakość światła z użyciem modułu Q.Light ANTI-AGEING

Emisja światła Q.Light z modulem ANTI-AGEING

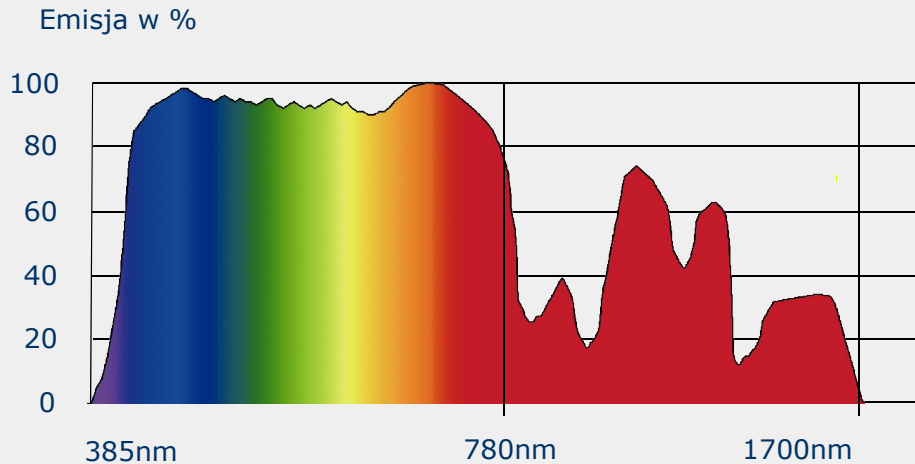

Q.Light parametry i dawki lecznicze (w min.) z użyciem urządzenia

Q.Light SKIN CARE UNIT & ANTI-AGEING MODUŁ

Urządzenie	Stopień polaryzacji	Odległość lecznicza	Średnica naświetlania	Dawka lecznicza w min
Q.Light® 70 NT IR SKIN CARE UNIT	≥98%	25cm	25cm	5
		20cm	20cm	4
		15cm	15cm	3

Jak prowadzić zabieg modulem Q.Light ANTI-AGEING

Ogólna terapia Q.light ANTI-AGEING


Aby uzyskać najlepsze efekty, terapia światłem **Q.Light** z modulem **ANTI-AGEING** powinna być stosowana codziennie. Światło **Q.Light** z modulem opóźniającym efekty starzenia jest światłem widzialnym, niekoherentnym, spolaryzowanym z bliską podczerwienią. Średnia dawka dostarczona skórze powinna wynosić minimum 12J/cm².

Skóra powinna być oczyszczona przed ekspozycją na światło. Odległość lampy od naświetlanej powierzchni max.25cm, czas naświetlania 5 min. Strumień światła powinien padać na naświetlaną powierzchnię pod kątem prostym. Specjalistyczne dermatologiczne lub kosmetyczne kremy lub serum mogą być aplikowane przed lub po zabiegu. Jednakże pozostałości kremów na skórze powinny być usunięte bezpośrednio przed naświetlaniem.

Kondycja skóry poprawia się widocznie w ciągu pierwszych 2 tygodni terapii.

Dzięki terapii światłem regeneracja starzejącej się skóry odbywa się na wiele sposobów:

- aktywacja mikrokrążenia
- Regulacja procesów komórkowych w skórze i tkankach
- produkcja nowych włókien kolagenowych i fibrynowych
- poprawa zaopatrzenia komórek w tlen dzięki fotomodulacji krwi
- optymalizacja procesu odnowy nabłonka dająca doskonałe efekty estetyczne stosowanych terapii

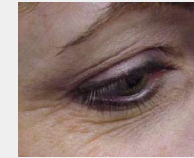


Początek terapii



Po 8 tygodniach terapii

Jakość światła z użyciem modułu Q.Light ACNE CARE

Emisja światła Q.Light z modulem ACNE CARE

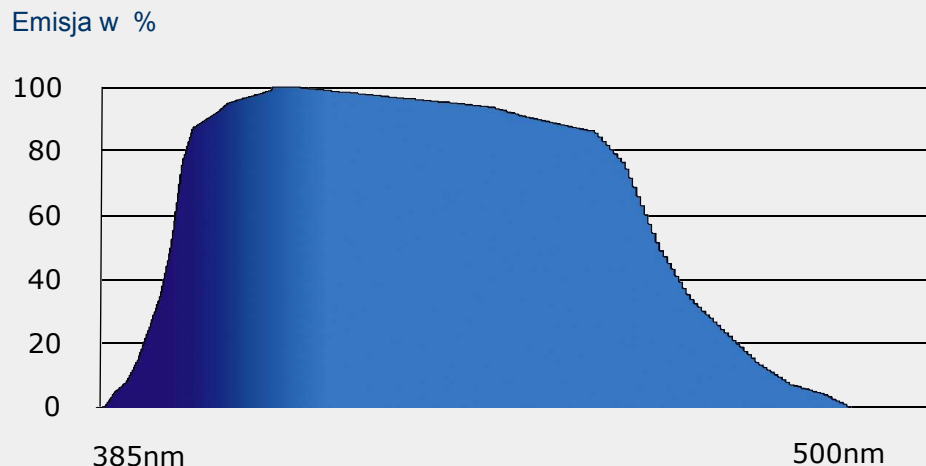

Q.Light parametry i dawki lecznicze (w min.) z użyciem urządzenia

Q.Light SKIN CARE UNIT& ACNE CARE MODUŁ

Urządzenie	Stopień polaryzacji	Odległość lecznicza	Średnica naświetlania	Dawka lecznicza w min
Q.Light® 70 NT IR SKIN CARE UNIT	≥98%	15cm	15cm	6
	≥98%	10cm	10cm	5
	≥98%	5cm	5cm	3

Jak leczyć trądzik Q.Light ACNE CARE.

Q.Light ACNE CARE

ze specjalnym spolaryzowanym spektrum w zakresie niebieskiego światła ma pozytywny wpływ na leczenie trądziku.

Badania naukowe i wyniki doświadczeń wykazują, że poszczególne przypadki trądziku są bardzo dobrze redukowane lub całkowicie wyleczone dzięki regularnej ekspozycji na światło **Q.Light ACNE CARE**.

Zabiegi lecznicze są bardzo krótkie. **Q.Light ACNE CARE** może w prosty sposób być włączany do prowadzonych w tradycyjny sposób miejscowych i systemowych terapii trądziku. Średnia dostarczona dawka wynosi około 12 J/cm² raz dziennie. Dla optymalnego efektu zaleca się oczyścić obszar leczony łagodnym środkiem myjącym. Skierować strumień światła **Q.Light** prosto na powierzchnię leczoną. Zabiegi lecznicze są bardzo krótkie. Czas oddziaływania w trakcie jednego zabiegu powinien wynosić 6 minut z maksymalnej odległości leczniczej.

Działania niepożądane oraz przeciwwskazania nie zostały odnotowane.

Biorąc pod uwagę korzystny wpływ na cały organizm oraz działanie regeneracyjne terapii światłem **Q.Light**, zaleca się stosowanie tej metody leczenia w różnych rodzajach zaburzeń dermatologicznych.



Przed terapią



Po 8 tygodniach terapii


Q.Light ACNE CARE MODULE - moduł do leczenia trądziku

Moduł **ACNE CARE** przeznaczony jest do efektywnej terapii trądziku i skóry z infekcjami lub stanami zapalnymi.


Q.Light ACNE CARE:

- trądzik pospolity
- trądzik zaskórnikowy
- trądzik grudkowy
- trądzik skupiony
- skóra zanieczyszczona i ze stanami zapalnymi
- skóra podrażniona
- skóra ze zmianami alergicznymi
- skóra wrażliwa

Q.Light® ACNE CARE

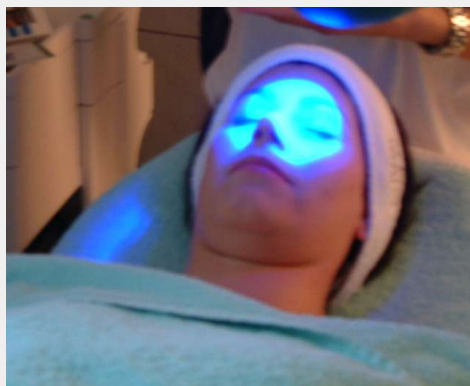

Dane techniczne modułu Q.Light ACNE CARE

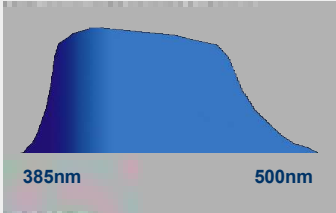Moduł	ACNE CARE
Średnica naświetlanej powierzchni w cm	25cm z max. odległości leczniczej
Źródło światła	Opatentowane źródło naturalnego widma światła dziennego.
Spektrum	385 – 500nm 
Polaryzacja	≥ 98%
Emisja widzialnego światła	Widzialne światło pomiędzy 385 – 500nm
Emisja podczerwieni	Bez podczerwieni
Emisja UV	Bez UV
Temperatura światła	Optymalny rozkład energii w całym widmie. Praktycznie zimne światło.
Certyfikaty	ISO 9001 & EN 46001
Znak CE	1275

Terapia Q.Light w walce z cellulitem


Moduł **Q.Light CELLULITE CARE** przeznaczony jest specjalnie do zastosowania w następujących przypadkach:

- cellulit we wszystkich stadiach
- osłabiona spistość tkanek
- skóra i tkanki z dysfunkcjami metabolicznymi
- skóra i tkanki z zaburzeniami mikrokrążenia
- stymulacja systemu limfatycznego

Q.Light® CELLULITE CARE




Dane techniczne modułu Q.Light CELLULITE CARE

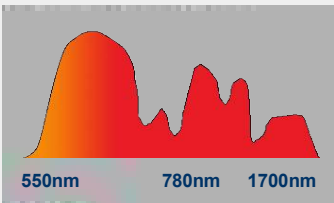Moduł	CELLULITE CARE
Średnica naświetlanej powierzchni w cm	25 cm z max. odległości leczniczej
Źródło światła	Opatentowane źródło naturalnego widma światła dziennego.
Spektrum	550 – 1700nm 
Polaryzacja	≥ 98%
Emisja widzialnego światła	Widzialne światło pomiędzy 550 – 780nm
Emisja podczerwieni	Bliska podczerwień 780 -1700nm
Emisja UV	Bez UV
Temperatura światła	Optymalny rozkład energii w całym widmie. Praktycznie zimne światło.
Certyfikaty	ISO 9001 & EN 46001
Znak CE	1275

Jakość światła z użyciem modułu Q.Light CELLULITE CARE

Emisja światła Q.Light z modulem CELLULITE CARE

Względna transmisja w %

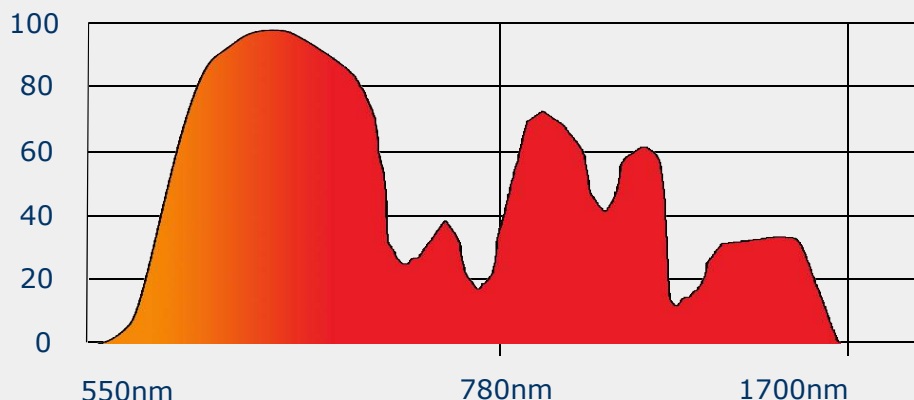

Q.Light parametry i dawki lecznicze (w min.) z użyciem urządzenia

Q.Light SKIN CARE UNIT & CELLULITE CARE MODUŁ

Urządzenie	Stopień polaryzacji	Odległość lecznicza	Średnica naświetlania	Dawka lecznicza w min
Q.Light® 70 NT IR SKIN CARE UNIT	≥98%	25cm	25cm	8
		20cm	20cm	6
		15cm	15cm	4

Jak leczyć cellulit modulem Q.Light CELLULITE CARE

Ogólna terapia Q.light CELLULITE CARE

Aby uzyskać najlepsze efekty, terapia światłem **Q.Light** z modulem **CELLULITE CARE** powinna być stosowana codziennie. Światło **Q.Light CELLULITE CARE** jest światłem spolaryzowanym pomarańczowym z bliską podczerwienią. Średnia dawka dostarczona skórze powinna wynosić minimum 19J/cm². Skóra powinna być oczyszczona przed ekspozycją na światło. Strumień światła powinien oświetlać powierzchnię leczoną pod kątem prostym.

Terapia **Q.Light CELLULITE CARE** jest idealnym przygotowaniem skóry i tkanek przed aplikacją specjalistycznych preparatów i maści antycellulitowych.

Korzystny wpływ i działanie regenerujące światła **Q.Light** wspiera różne rodzaje terapii antycellulitowych.



Problem



Początek terapii


Po 3 miesiącach terapii

Moduł **Q.Light PAIN CARE** jest przeznaczony do zastosowania:

- przed laserowym usuwaniem owłosienia
- przed aplikacją makijażu permanentnego
- przed aplikacją tatuażu
- przed depilacją
- ogólne działanie przeciwbólowe


Q.Light® PAIN CARE

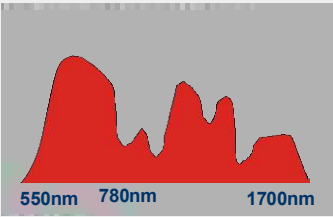

Moduł	PAIN CARE
Średnica naświetlanej powierzchni w cm	25 cm z max. odległości leczniczej
Źródło światła	Opatentowane źródło naturalnego widma światła dziennego.
Spektrum	550 – 1700nm 
Polaryzacja	≥ 98%
Emisja widzialnego światła	Widzialne światło pomiędzy 550 – 780nm
Emisja podczerwieni	Bliska podczerwień pomiędzy 780 -1700nm
Emisja UV	Bez UV
Temperatura światła	Optymalny rozkład energii w całym widmie.
Certyfikaty	ISO 9001 & EN 46001
Znak CE	1275

Jakość światła z użyciem modułu Q.Light PAIN CARE

Emisja światła Q.Light z modulem PAIN CARE

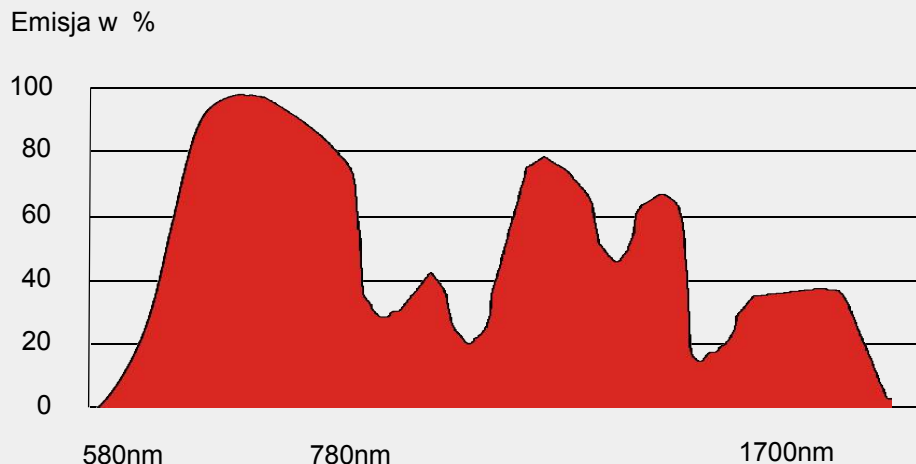

Q.Light parametry i dawki lecznicze (w min.) z użyciem urządzenia

Q.Light SKIN CARE UNIT & PAIN CARE MODUŁ

Urządzenie	Stopień polaryzacji	Odległość lecznicza	Średnica naświetlania	Dawka lecznicza w min
Q.Light® 70 NT IR SKIN CARE UNIT	≥98%	25cm	25cm	6
		20cm	20cm	5
		15cm	15cm	4

Jak zwalczać ból przy użyciu Q.Light

Ogólne leczenie bólu

Dla optymalnych rezultatów naświetlanie **Q.Light PAIN CARE** powinno być prowadzone przed oraz w trakcie specyficznych bolesnych zabiegów. Średnia dostarczona na obszar bolesny dawka energii powinna wynosić od 12J/cm² do 24J/cm². Strumień światła powinien padać na powierzchnię poddawaną terapii pod kątem prostym.



Terapia **Q.Light** jest idealnym uzupełnieniem różnych zabiegów kosmetycznych takich jak depilacja lub wykonanie makijażu permanentnego. Korzystny wpływ na zmniejszenie bólu jest powodem lepszego samopoczucia klienta.

W terapii **Q.Light** czasy naświetlania wynoszą 4-6 min na powierzchnię, na której będzie wykonywany zabieg np. depilacja. Zaleca się również naświetlanie w trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego. Przy takim postępowaniu praktycznie ból nie występuje.

Efekty uboczne oraz przeciwwskazania nie zostały odnotowane.

Q.Light SKIN CARE UNIT Colour Filter Set - Zestaw 6
specjalistycznych leczniczych filtrów do koloroterapii.

Q.Light SKIN CARE UNIT oferuje specjalistyczne filtry, dzięki którym przy pomocy urządzenia możemy zastosować koloroterapię. Stosując opatentowane źródło światła i wysokiej jakości filtry uzyskujemy wyjątkowo dużą jasność i intensywność barwy. Zatem koloroterapię możemy przeprowadzać idealnie czystą barwą.




Czerwony Filtr

Charakterystyka

- Najbardziej aktywny i najcieplejszy kolor

Efekt ogólny

Aktywuje rezerwy energii w przypadku psychicznego i fizycznego wyczerpania

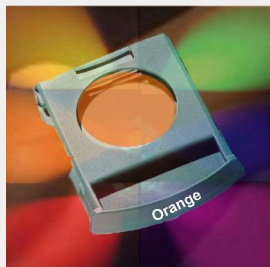

Pomarańczowy Filtr

Charakterystyka

- Aktywność i inspiracja

Efekt ogólny

Podnosi kreatywność i samoakceptację szczególnie w stanach depresji i w sytuacjach stresowych



Żółty Filtr

Charakterystyka

- Sukces i inteligencja

Efekt ogólny

Wzmocnienie i motywacja do działania w stanach zmęczenia i obniżenia nastroju



Zielony Filtr

Charakterystyka

- Równowaga i nadzieja

Efekt ogólny

Przywraca równowagę, uspokaja, wzmacnia siły życiowe, pomaga w opanowaniu emocji w sytuacjach stresowych




Niebieski Filtr

Charakterystyka

- Najzimniejszy i najbardziej odprężający kolor

Efekt ogólny

Rozprasza lęki i uspokaja, zmniejsza napięcie we wszelkiego rodzaju stresie

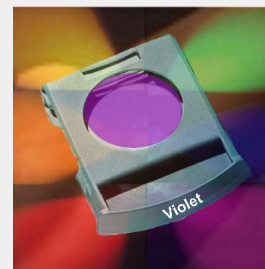

Fioletowy Filtr

Charakterystyka

- Indywidualizm i intuicja

Efekt ogólny

Znosi blokady, relaksuje, przywraca energię w trudnych chwilach

Terapeuci i specjaliści wellness proponują wiele dróg i technik dostarczenia kolorowego światła **Q.Light** ludzkiemu organizmowi. Zaleca się odbyć szkolenie, kurs lub seminarium na temat koloroterapii. Proponujemy zacząć od wizyty na: www.tantum.com.pl.

b & p® – biotechnologia i fotomedycyna

b & p® AG światowy lider w zastosowaniu światła w kosmetyce. Producent Systemów Terapii Światłem dla profesjonalistów.

Q.Light® SKIN CARE UNIT opatentowana technologia specjalistycznego światła:



Producent:

b & p® Schweiz AG

Schlossgut Wiggen
CH - 9404 Rorschacherberg

Tel: +41 (0) 71 858 20 60
Fax: +41 (0) 71 858 20 61
Email: info@bundp.net

Web: www.qlight.info

Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

Tantum sp.j.

ul. ks. H. Bednorza 2a-6
Budynek D1 - III piętro
40-384 Katowice

Tel: 32 / 730-11-05
GSM: 501 - 333 - 989
Tel/fax: 32 / 730-11-06

Web: www.tantum.com.pl

Przedstawiciel handlowy:

Q.Light®
Made in Switzerland

wyspecjalizowane systemy

www.tantum.com.pl